

# 雙連袋系統換液步驟操作手冊

## UltraBag – The system you can trust




Science + Solutions + **Systems** + Support

# 雙連袋系統換液步驟

## 1 準備用物

- 清潔桌面。
- 準備所需用物：雙連袋管組、口罩、迷你帽。
- 將雙連袋管組由外袋中取出，檢查有效期限、濃度、出口拉環、管路、出口塞、和透析液袋是否正常。
- 將身上輸液管露出衣服外，且確定流量控制夾是關閉的。
- 戴上口罩並徹底洗淨雙手。
- 若有處方，請依醫師指示將藥物加入透析液中。

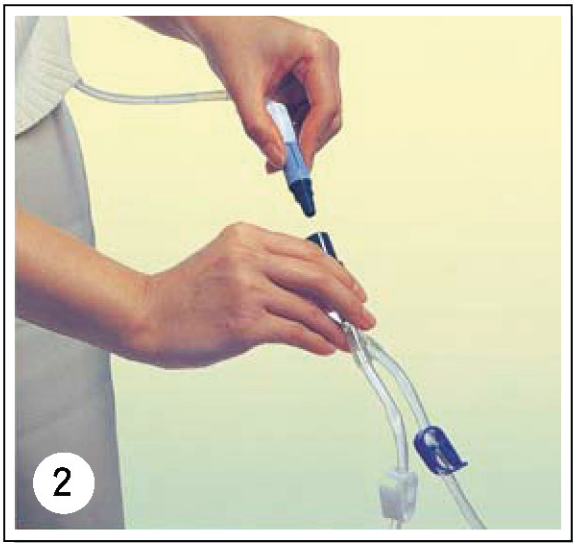

## 2 連接

- 關閉雙連袋管組中注入管路的藍色管夾。
- 折斷新鮮透析液端的綠色出口塞。
- 取下身上輸液管的迷你帽。
- 拉開雙連袋管組的病人端的出口拉環。
- **立即**連接輸液管與管組的病人端（注意：須穩固地握住輸液管並旋轉病人端之連接頭到完全接合為止）。

## 3 引流

- 將新鮮的透析液袋掛高至適當位置。
- 將引流袋放低至引流位置。
- 拉旋開輸液管上的流量控制夾，並觀察引流液是否混濁。
- 待引流完畢，關閉輸液管之流量控制夾。



## 4 排氣及沖洗

- 打開注入管路上的藍色管夾，以排氣及沖洗管路。
- 慢數1到5，並檢視新鮮透析液是否流入引流袋中。
- 關閉引流管路的白色管夾。




## 5 注入

- 旋開輸液管上的流量控制夾，讓新鮮透析液注入腹腔。
- 待注入完畢，關閉輸液管上的流量控制夾。
- 關閉注入管路的藍色管夾。



## 6 蓋上迷你帽

- 打開迷你帽的包裝，並檢查碘酒海綿是否潮濕。
- 分離管組的病人端與身上的輸液管。
- 將輸液管接頭朝下，護帽口朝上，旋轉迷你帽至完全與輸液管接合為止。

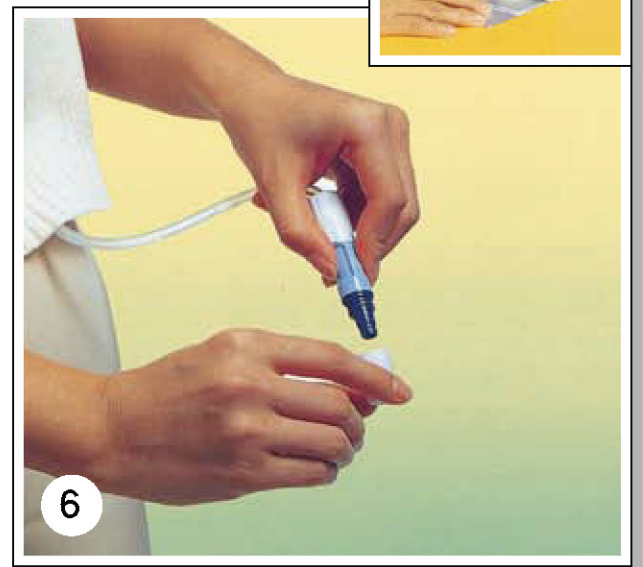

# 雙連袋系統結構圖



**Baxter**

百特醫療產品股份有限公司

台北市106敦化南路二段216號15樓

腹膜透析諮詢專線：0800-009989