

# GAMBAR KONSTRUKSI SISTIM ULTRA-BAG



**Baxter**

百特醫療產品股份有限公司


台北市106敦化南路二段216號15樓

腹膜透析諮詢專線：0800-009989

2007-08-UB-2-印

# BUKU PETUNJUK CARA PAKAI LANGKAH-LANGKAH SISTIM PENGGANTIAN CAIRAN ULTRA-BAG

## UltraBag –SISTIM YANG DAPAT DIANDALKAN

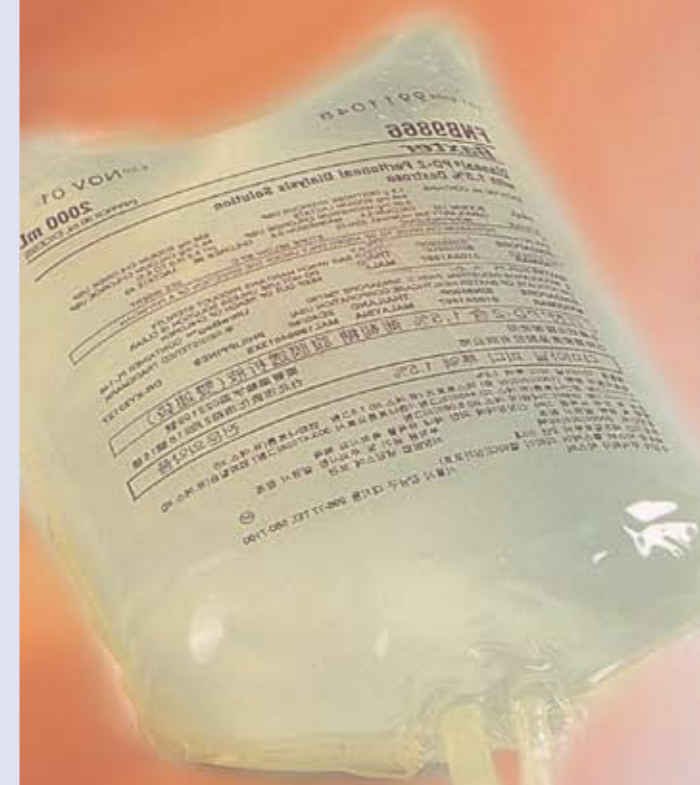

Science + Solutions + **Systems** + Support

**Baxter**



# LANGKAH-LANGKAH SISTIM PENGGANTIAN CAIRAN ULTRA-BAG

## 1 PERSIAPAN SEMUA KEPERLUAN

- BERSIHKAN MEJA BAGIAN ATAS.
- SIAPKAN SEMUA KEPERLUAN : SET SELANG ULTRA-BAG, PENUTUP MULUT, TOPI MINI.
- KELUARKAN ULTRA-BAG DARI KANTONG PENYIMPANANNYA, PERIKSA ISI CAIRAN PENELITIAN, KEKENTALAN, MASA BERLAKUNYA, TARIKAN TUANGAN KELUAR, SALURAN, PENUTUP DAN APAKAH ULTRA-BAG INI NORMAL KONDISINYA.
- KELUARKAN SALURAN DITUBUH SAMPAI DILUAR PAKAIAN, DAN YAKINKAN BAHWA PENJEPIT KONTROL DALAM KONDISI TERKUNCI.
- PAKAI PENUTUP MULUT DAN CUCI BERSIH KEDUA TANGAN DENGAN TUNTAS.
- BILAMANA ADA RESEP DARI DOKTER, LAKUKAN PERSIS APA YANG DIPERINTAHKAN DOKTER DAN MASUKKAN KEDALAM CAIRAN PENELITIAN.



## 2 PENYAMBUNGAN

- KUNCI PENJEPIT WARNA BIRU DALAM SET SELANG ULTRA-BAG.
- PATAHKAN PENUTUP WARNA HIJAU DARI ULTRA-BAG YANG SEGAR.
- BUANG TOPI MINI DARI SALURAN TUBUH SISAKIT.
- TARIK RING KELUAR BAGIAN ORANG SAKIT DARI ULTRA-BAG SET.
- SEGERA SAMBUNGAN KEBAGIAN SALURAN ORANG SAKIT.(PERHATIKAN : HARUS DENGAN TEPAT DIMASUKKAN SERTA DIPUTAR MASUK KEBAGIAN ORANG SAKIT DENGAN SEMPURNA)




## 3 PENYALURAN

- GANTUNGLAH ULTRA-BAG YANG SEGER DITEMPAT YANG PAS TINGGINYA.
- TEMPATKAN KANTONG PENYALURAN DITEMPAT BAGIAN BAWA.
- TARIKLAH PENJEPIT SALURAN DI SELANG PENYALUR, DAN PERHATIKAN APAKAH CAIRANNYA BUTEK.
- BILAMANA SELESAI PENYALURANNYA, KUNCI PENJEPIT PENYALUR.

## 4 BUANG UDARA DAN PEMBERSIHAN

- BUKALAH PENJEPIT WARNA BIRU DISALURAN PENYALUR, BUANG UDARA DAN LAKUKAN PEMBERSIHAN SALURANNYA.
- HITUNG DENGAN PELAN-PELAN 1 SAMPAI 5, SERTA PERIKSA APAKAH CAIRAN YANG SEGAR SUDAH MANGALIR MASUK KEDALAM KANTONG BELUM.
- KUNCI PENJEPIT WARNA PUTIH PADA SALURAN PENYALUR.

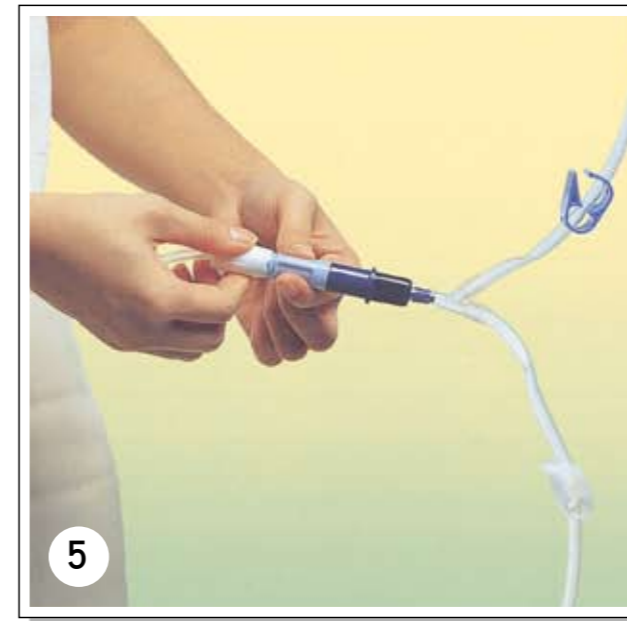

## 5 PENYALURAN

- PUTAR BUKA PENJEPIT DISALURAN PENYALUR DAN BIARKAN CAIRAN SEGAR MENGALIR MASUK KEDALAM RONGGA PERUT.
- BILAMANA SELESAI, KUNCI PENJEPIT PADA SALURAN PENYALURAN.
- KUNCI PENJEPIT WARNA BIRU PADA SALURAN PENYALUR.

## 6 TUTUP TOPI MINI

- BUKA BUNGKUSAN TOPI MINI, PERIKSA APAKAH SPON IODINE TINCTURE MASIH TETAP DALAM KONDISI BASAH.
- PISAHKAN SALURAN PADA ORANG SAKIT DAN SALURAN KEDALAM TUBUH.
- SALURAN MASUK HARUS HADAP KEBAWA, TOPI PENGAMAN HARUS HADAP KEATAS, PUTAR DAN MASUKKAN TOPI MINI DENGAN SALURAN DENGAN SEMPURNA.

