


双连袋系统换液步骤操作手册

UltraBag – The system you can trust

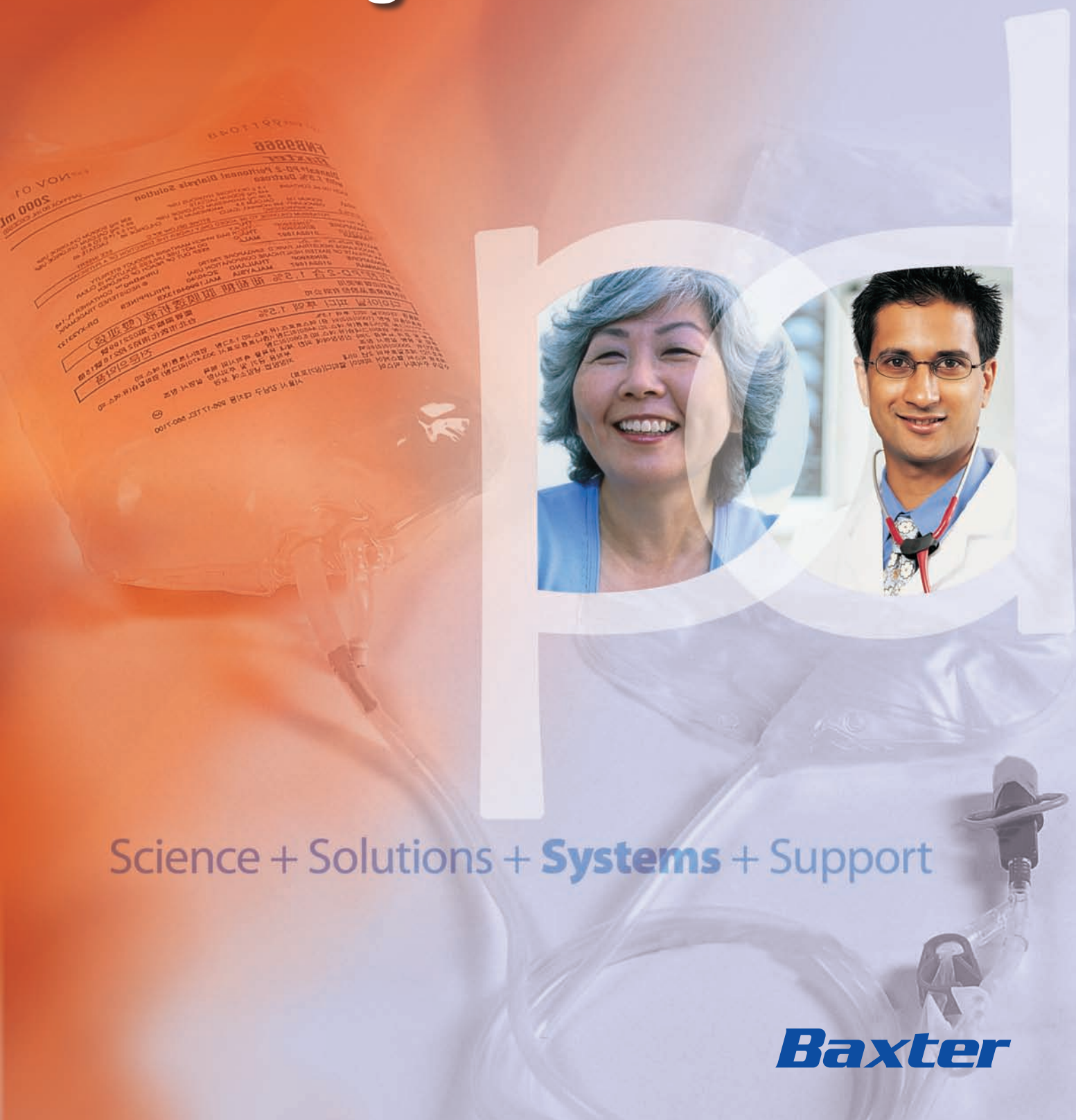


Science + Solutions + **Systems** + Support

Baxter

双连袋系统换液步骤

1 准备用物

- 清洁桌面。
- 准备所需用物：双连袋管组、口罩、迷你帽。
- 将双连袋管组由外袋中取出，检查有效期限、浓度、出口拉环、管路、出口塞、和透析液袋是否正常。
- 将身上输液管露出衣服外，且确定流量控制夹是关闭的。
- 戴上口罩并彻底洗净双手。
- 若有处方，请依医师指示将药物加入透析液中。

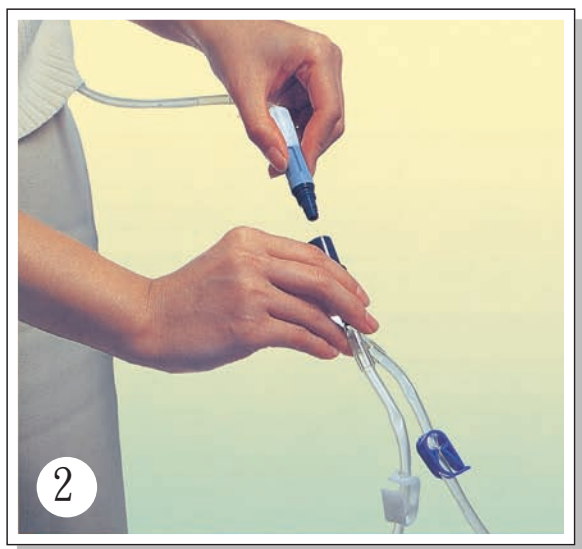

2 连接

- 关闭双连袋管组中注入管路的蓝色管夹。
- 折断新鲜透析液端的绿色出口塞。
- 取下身上输液管的迷你帽。
- 拉开双连袋管组的病人端的出口拉环。
- **立即**连接输液管与管组的病人端（注意：须稳固地握住输液管并旋转病人端之连接头到完全接合为止）。

3 引流

- 将新鲜的透析液袋挂高至适当位置。
- 将引流袋放低至引流位置。
- 拉旋开输液管上的流量控制夹，并观察引流液是否混浊。
- 待引流完毕，关闭输液管之流量控制夹。



4 排气及冲洗

- 打开注入管路中的蓝色管夹，以排气及冲洗管路。
- 慢数1到5，并检视新鲜透析液是否流入引流袋中。
- 关闭引流管路的白色管夹。



5 注入

- 旋开输液管上的流量控制夹，让新鲜透析液注入腹腔。
- 待注入完毕，关闭输液管上的流量控制夹。
- 关闭注入管路的蓝色管夹。



6 盖上迷你帽

- 打开迷你帽的包装，并检查碘酒海绵是否潮湿。
- 分离管组的病人端与身上的输液管。
- 将输液管接头朝下，护帽口朝上，旋转迷你帽至完全与输液管接合为止。



双连袋系统结构图



Baxter

百特医疗产品股份有限公司

台北市106敦化南路二段216号15楼

腹膜透析谘询专线：0800-009989