


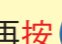


## ● 檢視或更改處方



開機，當螢幕出現「按綠色鍵開始執行」時，

- 按  螢幕顯示：「更改程式」
- 按  螢幕顯示：「治療方式：CCPD/IPD」
- 按  螢幕顯示：「總治療量：XXXX ml」
- 按  螢幕顯示：「治療時間：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_」
- 按  螢幕顯示：「注入量：XXXX ml」
- 按  螢幕顯示：「最末袋注入量：XXXX ml」
- 按  螢幕顯示：「最末袋葡萄糖濃度：相同/不同」
- 按  螢幕自動顯示：「週期數：XX」  
「留置時間：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_」

1. 若選擇更改左列項目請按 ，
2. 再按  或  更改選項或增減數字，
3. 更改後，再按  確認。





## ● 警示問題之處理

機器有異常狀況發生時，會發出警訊聲和停止透析液的輸送，並將問題顯示在螢幕上。  
當機器發生連續性嗶聲時：


1. 按  紅色鍵消音。
2. 處理螢幕上顯示之訊息，請參閱居家指導手冊之警示問題處理章節。
3. 矯正問題後，按  綠色鍵，機器會繼續治療。

## ● 停電之處理


當電源不足或電力喪失時，機器會停止運作，而且面板上的訊息也會消失。當電力恢復時，機器會出現「按綠色鍵開始執行」的字幕。

- 如果電力在30分鐘內恢復，機器不會發出警訊聲並會繼續執行治療。
- 如果電力在30分鐘內未恢復，機器會發出連續嗶聲並顯示「電力喪失」之訊息。
  1. 按  紅色鍵消音。
  2. 按  向下鍵檢視透析治療資料，等待電力恢復。
- 若電力在2小時內恢復，機器會發出連續嗶聲並顯示「電力恢復」之訊息。
  1. 按  紅色鍵消音。
  2. 按  綠色鍵，繼續治療。
- 若電力在2小時後未恢復，請與機器分離，待電力恢復後再重新上機。

## ● 機器說明

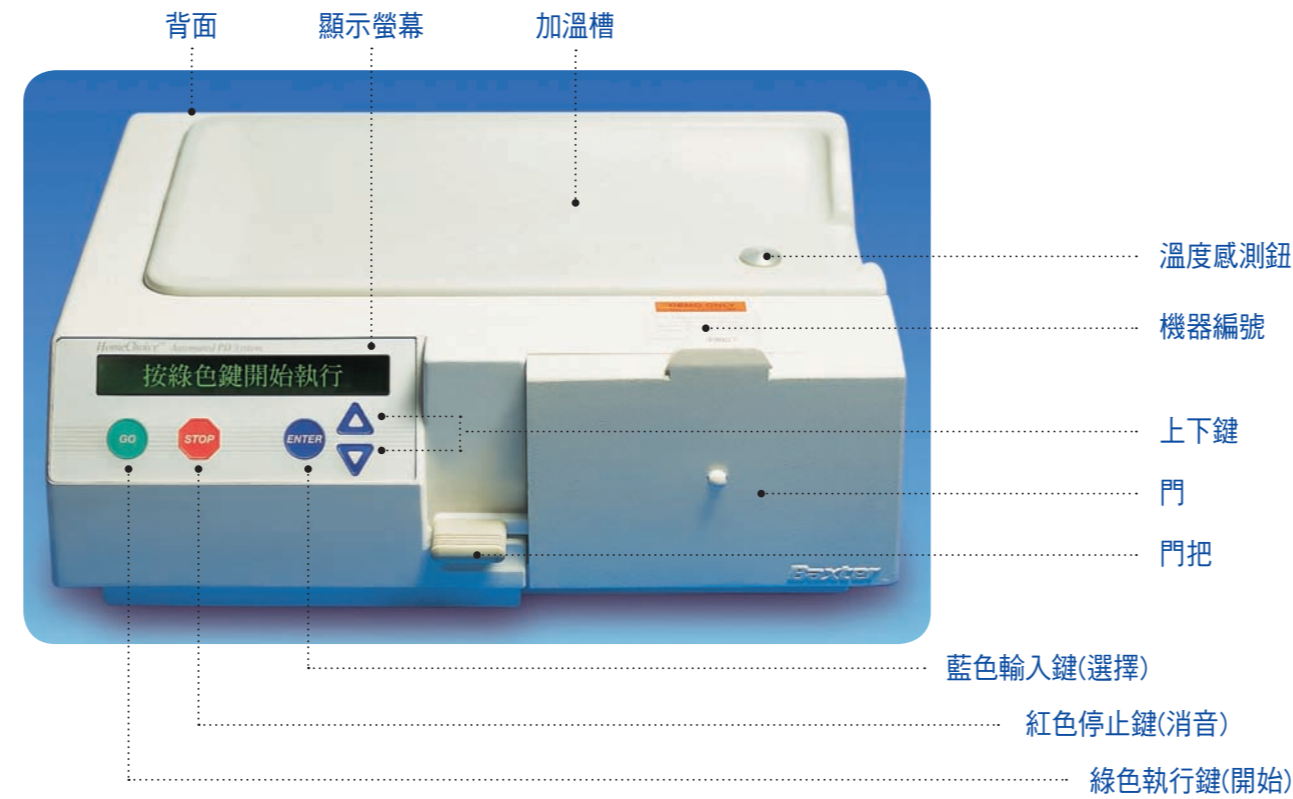

## ● 拋棄式管組說明

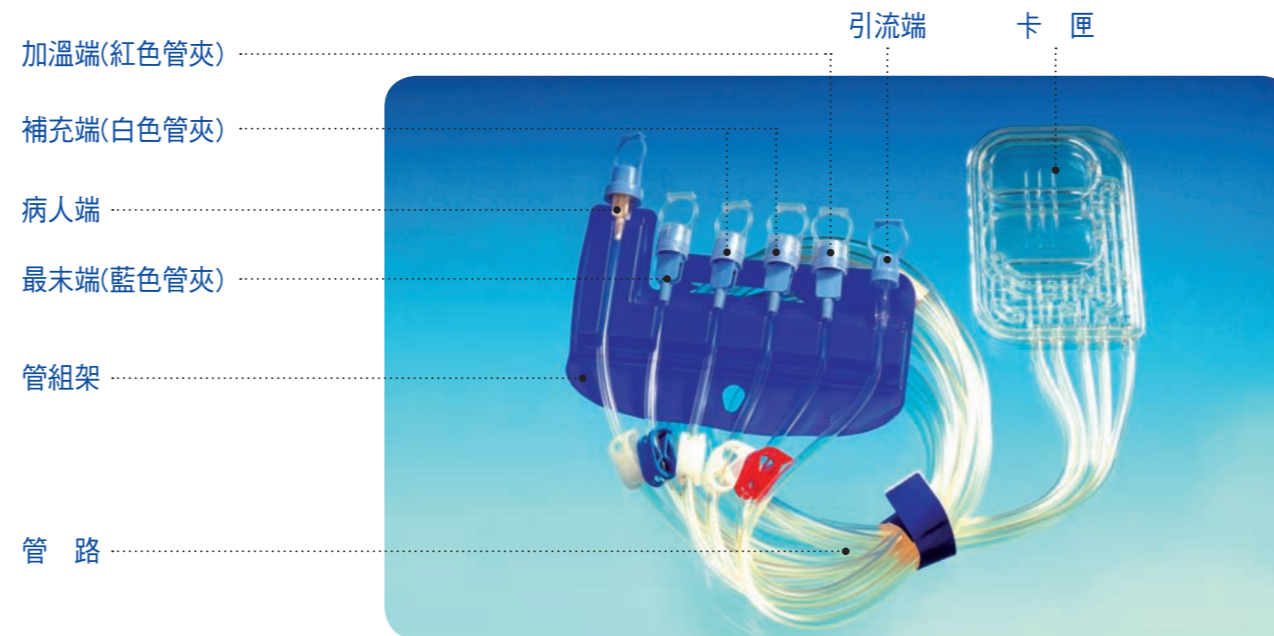

# 全自動腹膜透析機操作手冊

HomeChoice™ – The system you can trust



# HomeChoice™ 全自動腹膜透析機



## 特色

- 值得信賴—全球已超過50萬人使用
- 中文字幕，易學習易操作
- 個人化處方設定，符合您的需求
- 體積輕巧讓您攜帶方便

## 全自動腹膜透析機操作步驟

### 0 上機前準備



- 準備用品
  - 新鮮透析液
  - 引流桶(或延長管)
  - 拋棄式管組
  - 口罩
  - 迷你帽×2
  - 乾洗手
- 清潔桌面

\* 電源開啟前先清潔機器

### 1 上機



打開電源 等待螢幕自動顯示「按綠色鍵開始執行」

- 將透析液袋放置於機器加溫槽上，透析液需蓋過溫度感測鈕，另一袋則放置於機器旁。(圖1)
- 戴上口罩並洗手。
- 檢查透析液容量、濃度、效期、出口拉環、綠色出口塞、透析液外觀。
- 檢查拋棄式管組護帽是否完整並關閉所有管夾。



按 GO 螢幕顯示「裝置管組」

- 打開門蓋，將管組卡匣置入凹槽內，將門蓋上，並將門把壓到底。(圖2)
- 將管組架掛於門上。
- 取下引流管並移除拉環，將引流管固定於引流桶內的上緣。



按 GO

螢幕顯示「機器自我測試」，請再次洗手。測試完成後，螢幕會自動顯示「連接透析液袋」

- 取下紅色管夾管路，連接到加溫槽上透析液袋後，折斷綠色出口塞並打開紅色管夾。(圖3)
- 取下白色管夾管路，連接到補充袋透析液後，折斷綠色出口塞並打開白色管夾。  
如果您需要使用不同濃度的最末袋，則連接藍色管夾管路到透析液袋，折斷綠色出口塞並打開藍色管夾。
- 打開病人端管路的管夾，外露輸液管組。



按 GO

螢幕顯示「排氣」，請再次洗手。排氣完成後，機器螢幕閃爍顯示「連接你自己」與「確定病人端管路」

- 連接自己前，需先確認透析液面上升至病人端管路拉環處，並關閉管夾。
- 取下病人端管路，連接到身上的輸液管，旋轉至密合為止。(圖4)
- 轉開病人端管夾及輸液管開關。

### 2 治療開始



按 GO

機器螢幕顯示「0週期引流」(圖5)

待完成0週期引流後即開始透析療程。機器會自動進行引流、注入和留置直到完成療程為止，這段時間您可以先取下口罩，進行閱讀書報、休息或就寢。

### 3 治療完成




按 GO

隔日清晨完成治療後，螢幕顯示「治療完成」(圖6)

螢幕顯示「關閉所有管夾」

- 關閉身上輸液管開關。
- 關閉管組上病人端管夾。

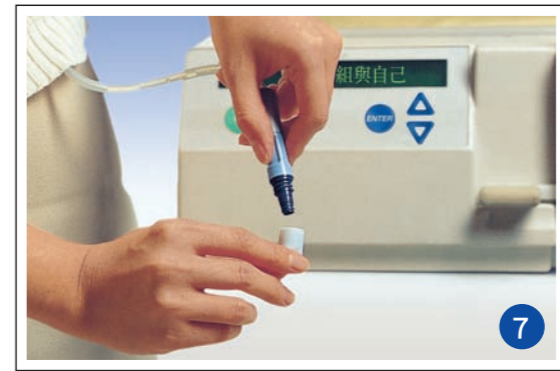

按 GO

螢幕顯示「分離你自己」

- 戴口罩並利用乾洗手清潔雙手。
- 打開新的迷你帽包裝，分離病人端管路後，立即套上新的迷你帽。(圖7)

按 GO

螢幕顯示「關機」，請先將下列的資料記錄於『APD每日記錄本』上：

### 4 記錄



按 ▽

0週期引流量：XXXX ML (圖8)  
(請記錄螢幕上顯示之數字)

按 ▽

總脫水量：XXXX ML  
(請記錄螢幕上顯示之數字)

按 ▽

平均留置時間：XX：XX (小時：分鐘)  
(請記錄螢幕上顯示之數字)

### 5 關機

打開門，取出卡匣。  
關閉電源。

### 6 善後處理

將取下之管組連同透析液袋，直接丟入垃圾桶。  
引流桶內的透析液倒入馬桶後，清洗引流桶並瀝乾。